

## Súprava vaginálnych dilatátorov Colors Power

### Údržba

Údržbu vodotesných dilatačných škár zvládnete za pár minút. Po použití nástroj namydíte a opláchnete prúdom horúcej vody. [Dezinfekcia pomôcok](#) odstráni z dilatátora aj mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si voľným okom nevšimli. Po dôkladnom umytí vložte nástroj späť do škatule alebo látkového vrečka tak, aby sa nedotýkal iných predmetov v zásuvke, pretože rôzne materiály na seba reagujú a navzájom sa poškodzujú.



### Vodeodolnosť

Všetky dilatátory v súprave sú vodotesné. Preto sa ľahko čistia a ženy s nimi môžu relaxovať aj vo vani, naložené v horúcej vode.

### Dizajn a tvar

Farebné, anatomicky tvarované dilatátory pripomínajú mierne rozťahnuté kondómy alebo dopravné kužele. Dva najväčšie sú vnútri duté, ostatné sú plné. Vďaka oválnej päťke sa ľahko držia v ruke, takže sa s nimi pri tréningu ľahko manipuluje.

### Materiál

Dilatátory sú vyrobené z kvalitného silikónu, ktorý je mäkký a pevný na dotyk. Odolá aj silnému svalovému zovretiu. Medzi výhody silikónového materiálu patria aj jeho neporézne a hypoalergénne vlastnosti, pre ktoré sa používa v medicíne.

### Farba

Paleta jemných odtieňov ružovej, červenej, modrej a fialovej je hravá a energická. Nabije vás silou a odhodlaním prekonať vlastné limity.

### Rozmery

Súprava dilatátorov ponúka päť rôznych veľkostí od najmenej po najväčšiu. Vďaka tejto širokej ponuke si ženy precvičia svaly panvového dna a naučia sa ich uvoľňovať.

### Minidilatátor

- Celková dĺžka: 7,2 cm
- Použiteľná dĺžka: 6,8 cm
- Najmenší priemer: 0,8 cm
- Najväčší priemer: 1,4 cm

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Veľkosť päty: 3,5 × 6,3 cm

## Malý dilatátor

- Celková dĺžka: 7,7 cm
- Použiteľná dĺžka: 7,2 cm
- Najmenší priemer: 1,2 cm
- Najväčší priemer: 1,9 cm
- Veľkosť päty: 4,2 × 6,3 cm

## Stredný dilatátor

- Celková dĺžka: 8 cm
- Použiteľná dĺžka: 7,4 cm
- Najmenší priemer: 1,5 cm
- Najväčší priemer: 2,2 cm
- Veľkosť pätky: 4,3 × 6,3 cm

## Veľký dilatátor

- Celková dĺžka: 8 cm
- Použiteľná dĺžka: 7,5 cm
- Najmenší priemer: 1,5 cm
- Najväčší priemer: 2,5 cm
- Priemer vnútorného otvoru: 1,6 cm
- Veľkosť pätky: 4,6 × 6,3 cm

## Najväčší dilatátor

- Celková dĺžka: 8,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 7,5 cm
- Najmenší priemer: 1,6 cm
- Najväčší priemer: 3 cm
- Priemer vnútorného otvoru: 1,6 cm
- Veľkosť pätky: 5,3 × 7,5 cm

## Bezpečnostné pokyny

- Uchovávajte mimo dosahu detí! Výrobok obsahuje malé diely, ktoré by mohli prehltnúť.
- Výrobok nepoužívajte v prípade chorej, poškodenej, alebo podráždenej pokožky. Používajte iba v dobrej fyzickej kondícii.
- Neodovzdávajte výrobok tretím osobám. Predídete tak ochoreniam a infekciám.
- Starostlivo si prečítajte informácie na obale výrobku, aby ste sa vyhli alergickým reakciám.
- Pokiaľ sa u Vás pri použití výrobku objaví veľmi nepríjemné kožné napätie, podráždenie, otláčeniny, zafarbenie

---

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

alebo iné fyzické ťažkosti, ktoré nie sú zámerom, výrobok prestaňte používať.

- Výrobok nezmrazujte ani neohrievajte.
- Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.
- Aby ste predišli zraneniu, dbajte na bezpečné používanie výrobku. Používanie výrobku je na vlastné nebezpečenstvo.
- Za škody a nehody vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a nedodržania bezpečnostných pokynov nie je možné v žiadnom prípade prevziať zodpovednosť.
- dilatátory: nebezpečenstvo poranenia močovej trubice, nepokračujte cez bolesť, používajte dostatočné množstvo sterilného lubrikačného gélu, nepoužívajte obyčajný lubrikačný gél.
- klystíry: nebezpečenstvo poranenia konečníka, klystíry napojené na sprchu - primerané množstvo vlažnej vody.
- gynekologické zrkadlá: nebezpečenstvo poranenia pošvy pri neobratnom zaobchádzaní.

[www.ruzovyslon.cz](http://www.ruzovyslon.cz)

Ružový slon sro Pri stanici 2a, Havířov. Tel. 596 810 697

---

**Predajca:**

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005